

SCHOU RASMUSSEN A/S

Brugsanvisning SPECIALTILPASSET udstyr

(2024-10)

Dette specialtilpassede udstyr er håndlavet og fremstillet på vores lokale værksted i Brøndby.

Schou Rasmussen leverer dette specialtilpassede udstyr med en forventning om, at der fra kundens side afsættes ressourcer til at følge op på brugeren af udstyret de første 14 dage, efter det er taget i brug, mhp. at evaluere om udstyret opfylder det forventede formål.

Forhandler: Denne brugsanvisning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af det specialtilpassede udstyr forstår produktoplysningerne.

Kunde: Læs denne brugsanvisning grundigt for at opnå den optimale brug af udstyret. Anvend udstyret under vejledning fra fagprofessionelle. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidigt brug af udstyret.

Leverancens indhold

SPECIALTILPASSET udstyr

1 brugsanvisning

Produktbeskrivelse

Schou Rasmussen A/S har optegnelser med det specialtilpassede udstyrs opbygning, mål samt materialevalg i sit kartotek. Dette muliggør lettere genbestilling.

Et specialtilpasset udstyr fra Schou Rasmussen kan være kørestolens forskellige massefremstillede, polstrede dele, f.eks.:

- Armlæn
- Sidestøtter
- BESPÆNDING
- Fodkasse
- Lårstyr

Schou Rasmussens specialtilpassede udstyr er altid opbygget med udgangspunkt i bestillers oplysninger om brugers individuelle behov.

Specialtilpasset udstyr fra Schou Rasmussen er altid bygget op omkring vores velkendte kvalitetsprodukter, som fremstilles i overensstemmelse med Forordningen for Medicinsk Udstyr, 2017/745, herunder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Hvis du ønsker yderligere information om SPECIALTILPASSET udstyr, kontakt venligst fabrikanten:

SCHOU RASMUSSEN A/S, Lyngager 8, DK-2605 Brøndby

Tlf. 44531727

E-mail: flemming@sr-v.dk

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med udstyret, bør indberettes til:

Schou Rasmussen A/S og
Lægemiddelstyrelsen

Brugsanvisning

Følg altid de mundtlige anvisninger, der er blevet givet fra Schou Rasmussen og/eller terapeut/faguddannet specialist i forbindelse med udlevering/montering af udstyret.

Fjern al evt. emballage før brug.

Maksimal brugervægt på specialtilpasset udstyr monteret på kørestol følger altid kørestolens anvisning.

Mindre dele (fx armlæn eller sidestøtter), som er monteret på en kørestol, er ikke lavet til at kunne bære maksimal kropsvægt. Der er risiko for beskadigelse eller ødelæggelse af komponenterne, hvis man f.eks. læner sig med fuld kropsvægt på/indover disse.

Det er altid en forudsætning for det specialtilpassede udstyrs tilsigtede formål samt holdbarhed, at bruger liftes og positioneres korrekt i kørestolen. Ved forkert liftning og/eller positionering øges risiko for uheldsmæssige tryk.

SCHOU RASMUSSEN A/S

Består udstyret delvist af skum, må dette ikke vaskes – skummet tåler ikke vand eller væsker.

Vær opmærksom på dødt skum, hvis udstyret består af dele af skum. Når skummet er dødt – dvs. ikke rejser sig helt igen efter at have været presset sammen, nedsættes udstyrets effekt og bør udskiftes snarest muligt. Kontrollér derfor jævnligt skummet i udstyret – især efter 1 års anvendelse.

Rengøring og pleje

Hvis det specialtilpassede udstyr er monteret med aftageligt betræk, skal vaskeanvisningen herpå altid følges.

Hvis udstyret ikke er monteret med aftageligt betræk, anbefales aftørring med fugtig klud som eneste rengøringsmulighed.

Holdbarhed

Holdbarheden på specialtilpasset udstyr er forventeligt 1-2 år ved daglig brug. Udstyret bør udskiftes hurtigst muligt, hvis der er beskadigelser på det.

Bortskaffelse

Brugeren skal sørge for en aftale med kommunen om bortskaffelse eller tilbagelevering.

Tekniske data

Tekniske data omkring anvendte materialer kan rekvireres hos fabrikanten.

Garanti

SPECIALTILPASSET udstyr produceres og forhandles i henhold til gældende europæiske lovgivning om medicinsk udstyr. Fabrikantens forpligtelser i tilfælde af fejl og mangler betinges af, at tredjemand ikke har foretaget indgreb i produktet.

Fabrikant

SCHOU RASMUSSEN A/S - Lyngager 8 - 2605 Brøndby - Danmark

Telefon: +45 44531727 / www.sr-s.dk / flemming@sr-v.dk



Specialtilpasset armlæn beklædt med læder



Specialtilpasset lårstyr beklædt med læder