

Brugsanvisning FLEXI SUPPORT rygssystem (2026-01)

Forhandler: Denne brugsanvisning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af **FLEXI SUPPORT** rygssystem forstår produktoplysningerne.

Kunde: Læs denne brugsanvisning grundigt for at opnå den optimale brug af **FLEXI SUPPORT** ryg. Anvend ryggen under vejledning fra fagprofessionelle. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidigt brug af **FLEXI SUPPORT** rygssystem.

Leverancens indhold

1 **FLEXI SUPPORT** rygssystem:

- 1 rygskjold, fastmonteret på kørestol.
- 2 sidevulster (højre og venstre), fastmonteret på rygskjold.
- 1 rygpude med standardbetræk

1 brugsanvisning

Produktbeskrivelse

FLEXI SUPPORT rygssystem består af 1 rygskjold fastmonteret på kørestol, 2 sidevulster (1 til højre side, 1 til venstre side) monteret på rygskjold og en aftagelig rygpude med betræk.

Rygskjold består af en 8 mm formspændt birkekrydsfinérplade beklædt med sort kunstlæder.

Sidevulsterne er produceret i CMC-skåret aluminium monteret med en kantliste og beklædt med 55 kg brandhæmmende koldskum. Sidevulsterne er beklædt med hhv. sort kunstlæder på ydersiden og strækbetræk på indersiden. Sidevulsterne er justerbare og kan tilpasses asymmetrisk, hvilket sikrer opretning og stabilitet og dermed en trykfordeling, der forebygger trykskader. Justering af sidevulster må udelukkende udføres af faguddannet specialist (fabrikant eller f.eks. ergoterapeut).

Rygpuden består af 6 cm Panteraskum og et betræk af hhv. strækbetræk på forsiden og perlon på bagsiden. Øverst på rygpudens bagside af betrækket er en "lomme" af kunstlæder, som sættes over rygskjoldet. Rygpudens betræk er aftageligt og kan maskinvaskes (se Rengøring og pleje).

Målene for rygsystemet er angivet på mærkningen. Husk at sikre, at du har valgt den rette størrelse pude til den stol brugeren anvender puden i. Målene anvendes også til at bestille ekstra betræk til puden.

Rygsystemets erklærede formål er at give brugeren en stabil siddestilling og sikre en trykfordeling, som forebygger trykskader på kroppen.

Hvis du ønsker yderligere information om FLEXI SUPPORT ryg, kontakt venligst fabrikanten:

SCHOU RASMUSSEN ApS, Lyngager 8, DK-2605 Brøndby

Tlf. 44531727, e-mail: emilie@sr-v.dk

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med ryggen, bør indberettes til: Schou Rasmussen ApS og Lægemiddelstyrelsen

Brugsanvisning

- Maksimal brugervægt er 120 kg.
- Fjern al emballage før brug.
- Justering af **FLEXI SUPPORT** ryg må udelukkende foretages af faguddannet specialist (fabrikant eller f.eks. ergoterapeut).
- Vær opmærksom på skred i brugers almentilstand, da dette kan medføre behov for ændringer i ryggens indstillinger. Ændringer i ryggens indstillinger skal i ethvert tilfælde foretages af en faguddannet specialist (fabrikant eller f.eks. ergoterapeut).
- Det er en forudsætning for **FLEXI SUPPORT** ryggens tilsigtede formål samt holdbarhed, at bruger liftes og positioneres korrekt i kørestolen. Ved forkert liftning og/eller positionering øges risiko for u hensigtsmæssige tryk.
- **FLEXI SUPPORT**s sidevulster er ikke lavet til at kunne bære maksimal kropsvægt. Der er risiko for beskadigelse eller ødelæggelse af sidevulster, hvis man f.eks. læner sig med fuld kropsvægt indover disse.
- Anbring rygpuden på rygskjoldet med mærkatet "Bag/Back" og lynlås placeret bagud og ned i stolen, således strækbetrækket vender ud mod bruger. Sørg for at lommen på betrækkets bagside monteres over rygskjoldet (se billede på næste side).

- Når rygpuden ikke er i brug, kan den med fordel tages ud for at ventilere.
- Betrækket er åndbart og strækbart i flere retninger, hvilket sikrer brugerens komfort og maksimerer skummets effektivitet.
- Undgå at anvende yderligere lag eller polstring mellem bruger og rygpude samt sidevulster, da dette kan reducere pudens og sidevulsternes effektivitet.
- Det indvendige skum i rygpude og sidevulster bør inspiceres regelmæssigt. Hvis betrækket beskadiges, må pude/sidevulster ikke anvendes, før der er monteret et nyt betræk. Det er vigtigt, at betrækket passer præcist til hhv. rygpude og sidevulster.
- Vær opmærksom på, at rygpude og sidevulster har en levetid på max. 2 år. Efter max. 2 års brug skal disse udskiftes. Sørg desuden for at registrere udskiftning på ryggenes mærkning (se billede 2, side 5).
- Ved montering af betræk skal det sikres, at alle skummets hjørner er korrekt monteret i betrækket.
- Skummet tåler ikke vand og væsker. Tilkøb inkontinensbetræk til rygpuden ved behov.
- Skummet kan ikke vaskes.
- Skridsikring på bagsiden af rygpuden: Lommen på betrækkets bagside, der skal monteres over rygskjoldet samt perlonbetrækket, der hæfter til velcro på rygskjoldet.
- Kontrollér, at puden sidder fast på rygskjoldet, inden bruger liftes/positioneres i stolen.
- Rygpuden skal monteres i ryggen som anvist på nedenstående billede:



Billede 1: Korrekt montering af rygpude

Rengøring og pleje

Betrækket til rygpuden er vaskbart og kan rengøres med en opløsning af neutralt vaskemiddel og varmt vand påført med engangsklud eller maskinvaskes ved 40°C med vaskemiddelopløsning.

Vi anbefaler ikke at vaske betrækket i vaskemaskinen ofte.

Luk lynlåsen på betrækket før vask. Det anbefales at bruge et vaskenet for at skåne betrækket og andet det vaskes sammen med. Vaskes sammen med lignende farver. Brug ikke blegemiddel, blødgøringsmiddel og kemiske rensmidler! Betrækket skal lufttørre efter vask.

OBS! Betrækket tåler ikke tørretumbler, skal lufttørres.

Rygskjold samt sidevulster kan ikke vaskes i maskinen. Rygskjoldet og ydersiden af sidevulsterne er beklædt med sort kunstlæder, indersiden af sidevulsterne er beklædt med strækbetræk ligesom rygpudens forside.

Kunstlæderet rengøres bedst ved aftørring med fugtig klud påført opvaskemiddel. Stærkt tilsmudsede områder rengøres med f.eks. Maxi 3 eller andet alkalisk rengøringsmiddel. Prøv altid først på et ikke synligt sted ved benyttelse af stærkt koncentrerede rengøringsmidler. Brug ingen opløsningsmidler, renseservietter, blegemidler, voks eller lignende.

Vær opmærksom på, at sidevulsternes inderside er beklædt med strækbetræk, som ikke er vandtæt. Dette rengøres derved bedst med en opløsning af neutralt vaskemiddel og varmt vand påført med en hårdt opvreden klud. Det er vigtigt, at kluden er hårdt opvreden, da det kan beskadige skummet, hvis der trænger vand igennem betrækket.

Brandsikkerhed er efter EU klasse B1.

Holdbarhed

Ryggen har en forventet levetid på 4 år ved daglig brug.

Vær dog opmærksom på løbende vedligehold og udskiftning af såvel rygpude som sidevulster efter max. 2 års brug. Rygpude og sidevulster har en forventet levetid ca. 24 måneder ved daglig brug. Brugsværdien kan øges ved at beskytte puden mod fugt og direkte sollys samt at stille rygpuden på højkant, så den kan ventileres, når den ikke benyttes.

Mærkning

I bunden af skumpuden og bagerst i det tilhørende betræk findes mærkning med relevante informationer for det enkelte produkt. Det anbefales at mærkning ikke fjernes fra produkterne.

Eksempel på mærkning der findes på produktet ses nedenfor. Bemærk, at størrelse, dato, HMI-nummer, UDI og LOT/REF/SN-nummer kan variere fra eksemplet.

Mærkning på skum

Flexi Support - 40x57 S-M Dato for ibrugtagning (sæt kryds):
 Max brugervægt 120 kg

2025:	2026:	2027:	2028:
1:	2:	3:	4:
5:	6:	7:	8:
9:	10:	11:	12:

REF HMI-nr.: 140872
LOT 2026-01-07

Holdbarhed: Max. 2 år efter ibrugtagning
 OBS! Dødt skum kan forekomme efter 1 års ibrugtagning.

UDI-bæreren: Godkendelsesdato: 2024.10.01
 Type: Version 1
 EU 2017/745 klasse 1

Schou Rasmussen ApS
 Lyngager 8
 DK-2605 Brøndby
 Tlf: 44531727
 www.sr-s.dk
 emilie@sr-v.dk

Mærkning på sidevulster:

Schou Rasmussen ApS
 Flexi Support
 sidestøtte Medium
 højre - ned

Schou Rasmussen ApS
 Flexi Support
 sidestøtte Medium
 venstre - ned

Mærkning på rygskjold:

Flexi Support Rygskjold 45x57
 Max brugervægt: 120 kg

MD

Dato for ibrugtagning:

2025:	2026:	2027:	2028:
1:	2:	3:	4:
5:	6:	7:	8:
9:	10:	11:	12:

Rygpude udskiftet: SÆT X
 Sidevulster udskiftet: SÆT X

Schou Rasmussen ApS
 Lyngager 8
 2605 Børnby-DK
 Tlf: +45 44531727
 www.sr-s.dk
 emilie@sr-v.dk

REF HMI nr. 140868
LOT 2026-01-08

Godkendelsesdato: 2024.10.01
 Type: Version 1
 EU 2017/745 klasse 1
 UDI-bæreren:

(01)05744007001398(11)260108

CE 2026-01-08

Mærkning på betræk:

Flexi Support 45x57
 Rygpude S-M

REF HMI nr. 140868
LOT 2026-01-08

2026-01-08

Godkendelsesdato: 2024.10.01
 Type: Version 1
 EU 2017/745 klasse 1
 UDI bæreren:

(01)05744007001398(11)260108

CE

Max brugervægt: 120 kg

Dato for ibrugtagning:

2025:	2026:	2027:	2028:
1:	2:	3:	4:
5:	6:	7:	8:
9:	10:	11:	12:

MD

Bag/Back

Schou Rasmussen ApS
 Lyngager 8
 2605 Brøndby

Tlf: 44531727

www.sr-s.dk
 emilie@sr-v.dk

Bortskaffelse

Brugeren skal sørge for en aftale med kommunen om bortskaffelse eller tilbagelevering.

Tilkøb af inkontinensbetræk

Inkontinensbetræk, som monteres under standardbetrækket, beskytter rygpuden mod væsker. Betrækket kan kogevaskes ved max. 90°C og tåler sprit. Betrækket skal lufttørre og tåler ikke tørretumbler.

Ved montering af betrækket skal det sikres, at alle hjørner er korrekt monteret.

Inkontinensbetrækket kan tilkøbes hos Schou Rasmussen.

Tekniske data

Tekniske data omkring anvendte materialer kan rekvireres hos fabrikanten.

Garanti

FLEXI SUPPORT ryg produceres og forhandles i henhold til gældende europæiske lovgivning om medicinsk udstyr. Fabrikantens forpligtelser i tilfælde af fejl og mangler betinges af, at tredjemand ikke har foretaget indgreb i produktet.

Fabrikant

SCHOU RASMUSSEN ApS - Lyngager 8 - 2605 Brøndby - Danmark

Telefon: +45 44531727 / www.sr-s.dk / emilie@sr-v.dk

