

## Brugsanvisning FEMORIS sædepude (revideret 2026-01)

**Forhandler:** Denne brugsanvisning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af **FEMORIS** sædepude forstår produktoplysningerne.

**Kunde:** Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at få den optimale brug af **FEMORIS** sædepude. Anvend puden under vejledning fra fagprofessionelle. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidigt brug af **FEMORIS** sædepude.

### Leverancens indhold

1 sædepude **FEMORIS**

1 udskifteligt standardbetræk

1 betjeningsvejledning

### Produktbeskrivelse

**FEMORIS** er opbygget af en kerne af trykaflastende Latex W8S med 55 kg brandhæmmende koldskumsider og et let sidestyr. Afslutningsvis er et 20 mm Latex W8S over hele siddefladen. Pudens har en skrå forkant for at opnå bedst mulig understøttelse.

Latexpositioneringspuden giver ekstra bæring og en let ind-ad-styring af lårbenet. Derved støtter pudens brugeren til en stabil siddestilling og sikrer en trykfordeling, som forebygger tryk-skader på kroppen.

Målene for pudens er angivet på mærkningen. Husk at sikre, at du har valgt den rette størrelse pude til den stol, brugeren anvender pudens i. Målene anvendes også til at bestille ekstra betræk til pudens.

Pudens erklærede formål er at give brugeren en stabil siddestilling og sikre en trykfordeling, som forebygger tryk-skader på kroppen.

**Hvis du ønsker yderligere information om FEMORIS kontakt venligst fabrikanten:**

**SCHOU RASMUSSEN ApS, Lyngager 8, DK-2605 Brøndby**

**Tlf. 44531727, e-mail: emilie@sr-v.dk**

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med pudens, bør indberettes til: Schou Rasmussen ApS og Lægemiddelstyrelsen

## Brugsanvisning

- Maksimum brugervægt: 110 kg.
- Fjern al emballage inden brug.
- Anbring puden på en stol eller kørestol med mærkatet "BACK" og lynlås placeret bagud.
- Den formede overflade skal vende opad.
- Betrækket er åndbart og strækbart i flere retninger, hvilket sikrer brugerens komfort og maksimerer skummets effektivitet.
- Undgå at anvende yderligere lag eller polstring mellem brugeren og puden, da dette kan reducere pudens effektivitet.
- Det indvendige skum bør inspiceres regelmæssigt. Hvis betrækket beskadiges, må puden ikke anvendes, før der er monteret et nyt betræk.
- Ved montering af betrækket skal det sikres, at alle skummets hjørner er korrekt monteret i betrækket. Det skal desuden sikres, at den formede overflade vender op mod brugeren, og at lynlåsen er placeret bagud.
- Skummet tåler ikke vand og væsker. Ved inkontinens kan der tilkøbes inkontinens-betræk.
- Skummet kan ikke vaskes.
- Skridsikring på undersiden: Der er påsyet 2 stk. 5 cm bred Astrakan (Velcro).
- Kontrollér, at puden sidder fast på bunden efter placering.
- Pudens skal vende som anvist på nedenstående billede:



## Rengøring og pleje

Betrækket er vaskbart og kan rengøres med en opløsning af neutralt vaskemiddel og varmt vand påført med engangsklud eller kan maskinvaskes ved 60°C med vaskemiddel-opløsning.

Vi anbefaler ikke at vaske betrækket i vaskemaskinen ofte.

Luk lynlåsen på betrækket før vask. Det anbefales at bruge et vaskenet for at skåne betrækket og andet det vaskes sammen med. Vaskes sammen med lignende farver. Brug ikke blegemiddel, blødgøringsmiddel eller kemiske rensmidler! Betrækket skal lufttørre efter vask.

**OBS! Betrækket tåler ikke tørretumbler, skal lufttørres.**

Betrækkets underside, kanter bagtil og i højre og venstre side er monteret med sort PVC.


PVC-materialet rengøres bedst ved aftørring med fugtig klud påført opvaskemiddel. Stærkt tilsmudsede områder rengøres med f.eks. Maxi 3. eller andet alkalisk rengøringsmiddel. Prøv altid først på et ikke synligt sted ved benyttelse af stærkt koncentrerede rengøringsmidler. Brug ingen opløsningsmidler, renseservietter, blegemidler, voks eller lignende.

Brandsikkerhed er efter EU klasse B1

## Holdbarhed

Forventet levetid ca. 12-18 måneder ved daglig brug. Brugsværdien øges ved at beskytte puden mod fugt og direkte sollys samt at stille puden på højkant, så den kan ventileres, når den ikke benyttes. Når skummet er dødt – dvs. ikke rejser sig helt igen efter at have været presset sammen, nedsættes pudens effekt og bør skiftes snarest muligt. Kontrollér derfor jævnligt puden – især efter 1 års anvendelse.

Pudens forventede holdbarhed er gældende fra den tages i brug. Derfor anbefaler vi, at man benytter sig af afkrydsningsskemaerne, der er placeret på hhv. pudens skum og betræk. På betrækket er afkrydsningsskemaet på symærket med vaskeanvisning. Billedet nedenfor viser,

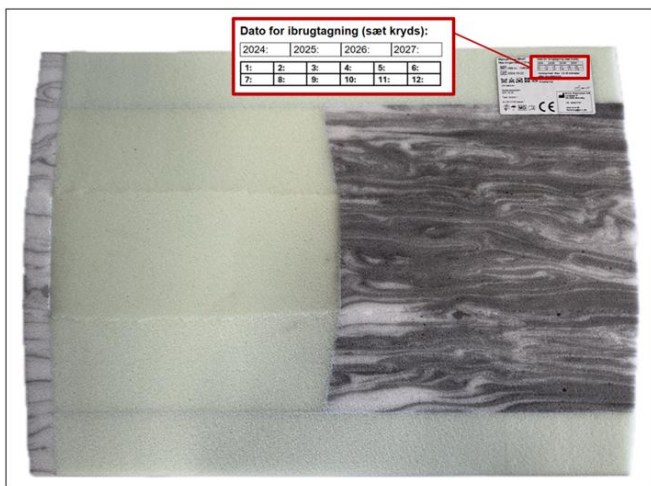

hvor afkrydsningsskema for ibrugtagning er placeret på pudens skum:

*Billede: Pude uden betræk. Afkrydsningsskema er placeret i bunden af puden. Kryds af hvilket år samt hvilken måned (1-12), puden er taget i brug. Din pude kan se anderledes ud end denne.*

## Mærkning

I bunden af skumpuden og bagerst i det tilhørende betræk findes mærkning med relevante informationer for det enkelte produkt. Det anbefales at mærkning ikke fjernes fra produkterne.

Eksempel på mærkning der findes på produktet ses nedenfor. Bemærk, at størrelse, dato, HMI-nummer, UDI og LOT/REF/SN-nummer kan variere fra eksemplet.

### Mærkning på skum

**Femoris 40x48**  
Max brugervægt 110 kg

**REF** HMI-nr.: 89079

**LOT** 2026-01-08

UDI bæreren:  Godkendelsesdato: 2021.03.09

Type: Version 1

EU 2017/745 klasse 1

Dato for ibrugtagning (sæt kryds):

2025:		2026:		2027:		2028:	
1:	2:	3:	4:	5:	6:		
7:	8:	9:	10:	11:	12:		

Holdbarhed: Max. 12-18 måneder efter ibrugtagning

OBS! Dødt skum kan forekomme efter 1 års ibrugtagning.




2026-01-08 

Schou Rasmussen ApS  
Lyngager 8  
DK-2605 Brøndby

Tlf.: 44531727

www.sr-s.dk  
emilie@sr-v.dk

### Mærkning på betræk:

<p><b>Femoris 40x48</b></p> <p><b>REF</b> HMI nr. 89079</p> <p><b>LOT</b> 2026-01-08</p> <p> 2026-01-08</p> <p>Godkendelsesdato: 2021.03.09</p> <p>Type: Version 1</p> <p>EU 2017/745 klasse 1</p> <p>UDI-bæreren:</p> <p></p> <p>(01)05744007001114 (11)260108</p> <p></p>	<p>Max brugervægt: 110 kg</p> <p></p> <p>Dato for ibrugtagning:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">2025:</th> <th colspan="2">2026:</th> <th colspan="2">2027:</th> <th colspan="2">2028:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1:</td><td>2:</td><td>3:</td><td>4:</td><td>5:</td><td>6:</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7:</td><td>8:</td><td>9:</td><td>10:</td><td>11:</td><td>12:</td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Bag/Back</b></p>	2025:		2026:		2027:		2028:		1:	2:	3:	4:	5:	6:			7:	8:	9:	10:	11:	12:			<p></p> <p>Schou Rasmussen ApS Lyngager 8 2605 Brøndby</p> <p>Tlf.: 44531727</p> <p>www.sr-s.dk emilie@sr-v.dk</p>
2025:		2026:		2027:		2028:																				
1:	2:	3:	4:	5:	6:																					
7:	8:	9:	10:	11:	12:																					

## **Bortskaffelse**

Brugeren skal sørge for en aftale med kommunen om bortskaffelse eller tilbagelevering.

## **Tilkøb af inkontinensbetræk**

Inkontinensbetræk beskytter sædepuden mod væsker og kan tilkøbes i sig selv eller monteres under standardbetrækket. Betrækket kan kogevaskes ved max. 90°C og tåler sprit. Betrækket skal lufttørre og tåler ikke tørretumbler. Ved montering af betrækket skal det sikres, at alle hjørner er korrekt monteret, og den formede overflade vender op mod brugeren.

Inkontinensbetrækket indeholder det antibakterielle stof 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate for at forhindre vækst af bakterier og svamp. Vær opmærksom på, at det hos nogle kan forårsage hudirritationer ved direkte kontakt med hud.

Inkontinensbetrækket kan tilkøbes hos Schou Rasmussen.

## **Tekniske data**

Tekniske data omkring anvendte materialer kan rekvireres hos SCHOU RASMUSSEN ApS.

## **Garanti**

**FEMORIS** produceres og forhandles i henhold til gældende europæiske lovgivning om medicinsk udstyr. Fabrikantens forpligtelser i tilfælde af fejl og mangler betinges af, at tredjemand ikke har foretaget indgreb i produktet.

## **Fabrikant**

SCHOU RASMUSSEN ApS - Lyngager 8 - 2605 Brøndby - Danmark

Telefon: 44531727 / [www.sr-s.dk](http://www.sr-s.dk) / [emilie@sr-v.dk](mailto:emilie@sr-v.dk)

