

## Brugsanvisning **MANUEL PLUS** sædepude (revideret 2026-01)

**Forhandler:** Denne brugsanvisning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af **MANUEL PLUS** sædepuden forstår produktoplysningerne.

**Kunde:** Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at få den optimale brug af **MANUEL PLUS** sædepude. Anvend puden under vejledning fra fagprofessionelle. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidigt brug af **MANUEL PLUS** sædepude.

### Leverancens indhold

1 **MANUEL PLUS** sædepude

1 aftageligt standardbetræk

1 brugsanvisning

### Produktbeskrivelse

**MANUEL PLUS** sædepude er opbygget af en base af 55 kg brandhæmmende koldskum foran og i siderne. Den har et trykaflastende felt af Panteraskum. Afslutningsvis er 20 mm Panteraskum over hele siddefladerne. Pudens har en let skråning i forkant for at opnå bedst mulig understøttelse samt en udskæring i bunden for at opnå en god pasform til kørestole med blød bund.

Skummet foran og i siderne giver stabilitet til siddestillingen og ekstra bæring ved lårbenet. Skummet i forkanten giver, i samarbejde med Panteraskummet bagtil, bækkenet mulighed for aflastning og hindrer samtidig bagudkipning.

Målene for pudens er angivet på mærkningen. Husk at sikre, at du har valgt den rette størrelse pude til den stol, brugeren anvender pudens i. Målene anvendes også til at bestille ekstra betræk til pudens.

Pudens erklærede formål er at give brugeren en stabil siddestilling og sikre en trykfordeling, som forebygger trykskader på kroppen.

**Hvis du ønsker yderligere information om **MANUEL PLUS** sædepude kontakt venligst fabrikanten:**

**SCHOU RASMUSSEN ApS, Lyngager 8, DK-2605 Brøndby,**

**Tlf. 44531727, e-mail: [emilie@sr-v.dk](mailto:emilie@sr-v.dk)**

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med puden, bør indberettes til:  
Schou Rasmussen ApS og Lægemiddelstyrelsen

## **Brugsanvisning**

- Maksimum brugervægt: 110 kg.
- Fjern al emballage før brug.
- Anbring puden på en stol eller kørestol med mærkatet "Bag/Back" og lynlås placeret bagud.  
Den flade polstrede overflade skal vende opad og velcro båndet nedad.
- Betrækket er åndbart og strækbart i flere retninger, hvilket sikrer brugerens komfort og maksimerer skummets effektivitet.
- Betrækket indeholder det antibakterielle stof 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate for at forhindre vækst af bakterier og svamp. Vær opmærksom på, at det hos nogle kan forårsage hudirritationer ved direkte kontakt med hud.
- Undgå at anvende yderligere lag eller polstring mellem person og pude, da dette kan reducere pudens effektivitet.
- Det indvendige skum bør inspiceres regelmæssigt. Hvis betrækket beskadiges, må produktet ikke anvendes før der er monteret et nyt betræk.
- Ved montering af betrækket skal det sikres, at alle skummets hjørner er korrekt monteret i betrækket. Det skal desuden sikres, at den flade polstrede overflade vender op mod brugeren, og at mærkatet "Bag/Back" og lynlåsen er placeret bagud.
- Skummet tåler ikke vand og væsker.
- Skummet kan ikke vaskes.
- Skridsikring på undersiden: Der er påsyet 2 stk. 5 cm bred Astrakan (Velcro).
- Kontrollér, at puden sidder fast på bunden efter placering.
- Puden skal monteres som vist på nedenstående billede:



## Rengøring og pleje

Betrækket er vaskbart og kan rengøres med en opløsning af neutralt vaskemiddel og varmt vand påført med engangsklud eller kogevaske ved max. 90°C. Betrækket tåler også rengøring med sprit.

Vi anbefaler ikke at vaske betrækket i vaskemaskinen ofte.

Luk lynlåsen på betrækket før vask. Det anbefales at bruge et vaskenet for at skåne betrækket og andet det vaskes sammen med. Vaskes sammen med lignende farver. Brug ikke blegemiddel, blødgøringsmiddel eller kemiske rensmidler. Betrækket skal lufttørre efter vask.

**OBS! Betrækket tåler ikke tørretumbler, skal lufttørres**


Betrækket består af inkontinensstof på overfladen, i siderne og bunden. Dette hindrer, at væsker kan trænge ind til skumpuden.

Brandsikkerhed er efter EU klasse B1.

## Holdbarhed

Forventet levetid er 12-18 måneder ved daglig brug. Brugsværdien kan øges ved at beskytte puden mod fugt og direkte sollys samt at stille sædepuden på højkant, så den kan ventileres, når den ikke benyttes. Når skummet er dødt – dvs. ikke rejser sig helt igen efter at have været presset sammen, nedsættes pudens effekt og bør skiftes snarest muligt. Kontroller derfor jævnligt puden – især efter 1 års anvendelse.

Pudens forventede holdbarhed er gældende fra den tages i brug. Derfor anbefaler vi, at man benytter sig af afkrydsningsskemaerne, der er placeret på hhv. pudens skum og betræk. På betrækket er afkrydsningsskemaet på symærket med vaskeanvisning. Billedet nedenfor viser, hvor afkrydsningsskema for ibrugtagning er placeret på pudens skum:

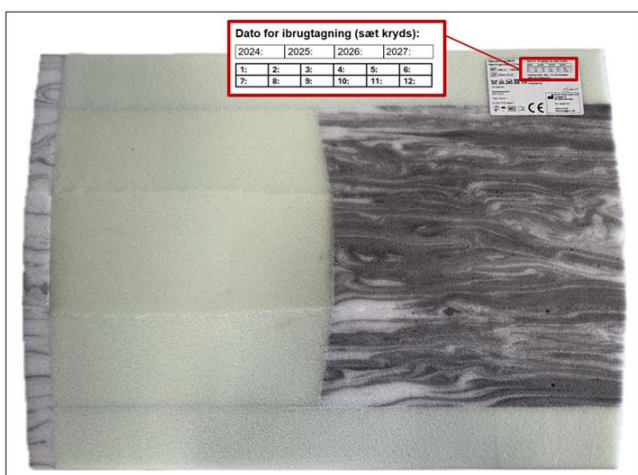

*Billede: Pude uden betræk. Afkrydsningsskema er placeret i bunden af puden. Kryds af hvilket år samt hvilken måned (1-12), puden er taget i brug. Din pude kan se anderledes ud end denne.*

## Bortskaffelse

Brugeren skal sørge for en aftale med kommunen om bortskaffelse eller tilbagelevering.

## Mærkning

I bunden af skumpuden og bagerst i det tilhørende betræk findes mærkning med relevante informationer for det enkelte produkt. Det anbefales at mærkning ikke fjernes fra produkterne.

Eksempel på mærkning der findes på produktet ses nedenfor. Bemærk, at størrelse, dato, HMI-nummer, UDI og LOT/REF/SN-nummer kan variere fra eksemplet.

### Mærkning på skum

<b>Manuel Plus 35x40</b> Max brugervægt 110 kg		<b>Dato for ibrugtagning (sæt kryds):</b>			
<b>REF</b> HMI-nr.: 128043		2025	2026	2027	2028
<b>LOT</b> 2026-01-08		1:	2:	3:	4:
UDI bærerør:		5:	6:	7:	8:
Godkendelsesdato: 2021.02.25		9:	10:	11:	12:
Type: Version 1		<b>Holdbarhed: Max. 12-18 måneder efter ibrugtagning</b>			
EU 2017/745 klasse 1		<b>Obs! Dødt skum kan forekomme efter 1 års ibrugtagning.</b>			
 (01)05744007000001 (11)260108		Schou Rasmussen ApS Lyngager 8 DK-2605 Brøndby +45 44531727 www.sr-s.dk emilie@sr-v.dk			

### Mærkning på betræk:

<b>Manuel Plus 35x40</b> <b>REF</b> HMI nr. 128043 <b>LOT</b> 2026-01-08  2026-01-08 Godkendelsesdato: 2021.02.25 Type: Version 1 EU 2017/745 klasse 1 UDI-bærerør:  (01)05744007000001 (11)260108 	Max brugervægt: 110 kg  <b>Dato for ibrugtagning:</b> 2025: 2026: 2027: 2028: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12:   <b>Bag/Back</b>	 Schou Rasmussen ApS Lyngager 8 2605 Brøndby Tlf.: 44531727 www.sr-s.dk emilie@sr-v.dk
---	---	---

## **Tilkøb af betræk**

Af hygiejniske årsager kan det være praktisk med ekstra betræk til puden.

Ved behov for hyppig vask kan supplerende betræk magen til standardbetrækket på **MANUEL PLUS** sædepude tilkøbes.

Der kan yderligere tilkøbes et inkontinensbadehættebetræk der monteres under standardbetrækket, for ekstra beskyttelse af skumpuden i tilfælde af hyppig/daglig disponering for væsker. Betræk kan tilkøbes hos Schou Rasmussen.

## **Tekniske data**

Tekniske data omkring anvendte materialer kan rekvireres hos fabrikanten.

## **Garanti**

**MANUEL PLUS** sædepude produceres og forhandles i henhold til gældende europæisk lovgivning om medicinsk udstyr. Fabrikantens forpligtelser i tilfælde af fejl og mangler betinges af, at tredjemand ikke har foretaget indgreb i produktet.

## **Fabrikant**

SCHOU RASMUSSEN ApS - Lyngager 8 - 2605 Brøndby - Danmark

Telefon: 44531727 / [www.sr-s.dk](http://www.sr-s.dk) / [emilie@sr-v.dk](mailto:emilie@sr-v.dk)

