

Brugsanvisning PELVIS HØJ sædepude (revideret 2026-01)

Forhandler: Denne brugsanvisning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af **PELVIS HØJ** sædepude forstår produktoplysningerne.

Kunde: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at få den optimale brug af **PELVIS HØJ** sædepude. Anvend puden under vejledning fra fagprofessionelle. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidigt brug af **PELVIS HØJ** sædepude.

Leverancens indhold

1 sædepude **PELVIS HØJ**

1 udskifteligt standardbetræk

1 betjeningsvejledning

Produktbeskrivelse

PELVIS HØJ er opbygget af en base af 55 kg brandhæmmende koldskum foran og i siderne. Den har et trykaflastende felt af Latex W8S, med en 20 mm forhøjning i forkanten, samt et let sidestyr. Afslutningsvis er et 20 mm Latex W8S over hele siddefladen. Pudens har en skrå forkant for at opnå bedst mulig understøttelse.

Skummet foran og i siderne giver stabilitet til siddestillingen og ekstra bæring ved lårbenet. Latexforhøjningen i forkanten er med til at hindre bagudkipning af bækkenet og giver en bedre understøttelse af låret.

Målene for pudens er angivet på mærkningen. Husk at sikre, at du har valgt den rette størrelse pude til den stol, brugeren anvender pudens i. Målene anvendes også til at bestille ekstra betræk til pudens.

Pudens erklærede formål er at give brugeren en stabil siddestilling og sikre en trykfordeling, som forebygger trykskader på kroppen.

Hvis du ønsker yderligere information om PELVIS Høj kontakt venligst fabrikanten:

SCHOU RASMUSSEN ApS, Lyngager 8, DK-2605 Brøndby

Tlf.: 44531727, e-mail: emilie@sr-v.dk

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med pudens, bør indberettes til: Schou Rasmussen ApS og Lægemiddelstyrelsen.

Brugsanvisning

- Maksimum brugervægt: 110 kg.
- Fjern al emballage før brug.
- Anbring puden på en stol eller kørestol med mærkatet "BACK" og lynlås placeret bagud.
- Den formede overflade skal vende opad.
- Betrækket er åndbart og strækbart i flere retninger, hvilket sikrer patienten komfort og maksimerer skummets effektivitet.
- Undgå at anvende yderligere lag eller polstring mellem brugeren og puden, da dette kan reducere pudens effektivitet.
- Det indvendige skum bør inspiceres regelmæssigt. Hvis betrækket beskadiges, må puden ikke anvendes før der er monteret et nyt betræk.
- Ved montering af betrækket skal det sikres, at alle skummets hjørner er korrekt monteret i betrækket. Det skal desuden sikres, at den formede overflade vender op mod brugeren og at lynlåsen er placeret bagud.
- Skummet tåler ikke vand og væsker. Ved inkontinens kan der tilkøbes inkontinens-betræk.
- Skummet kan ikke vaskes.
- Skridsikring på undersiden: Der er påsyet 2 stk. 5 cm bred Astrakan (Velcro).
- Kontrollér, at puden sidder fast på bunden efter placering.
- Puden skal monteres som anvist på nedenstående billede:



Rengøring og pleje

Betrækket er vaskbart og kan rengøres med en opløsning af neutralt vaskemiddel og varmt vand påført med engangsklud eller maskinvaskes ved 60°C med vaskemiddelopløsning.

Vi anbefaler ikke at vaske betrækket i vaskemaskinen ofte.

Luk lynlåsen på betrækket før vask. Det anbefales at bruge et vaskenet for at skåne betrækket og andet det vaskes sammen med. Vaskes sammen med lignende farver. Brug ikke blegemiddel, blødgøringsmiddel eller kemiske rensedmidler! Betrækket skal lufttørre efter vask.

OBS! Betrækket tåler ikke tørretumbler, skal lufttørres.

Betrækkets underside, kanter bagtil og i højre og venstre side er monteret med sort PVC.


PVC-materialet rengøres bedst ved aftørring med fugtig klud påført opvaskemiddel. Stærkt tilsmudsede områder rengøres med f.eks. Maxi 3. eller andet alkalisk rengøringsmiddel. Prøv altid først på et ikke synligt sted, med stærke koncentrerede rengøringsmidler. Brug ingen opløsningsmidler, renseservietter, blegemidler, voks eller lignende.

Brandsikkerhed er efter EU klasse B1

Holdbarhed

Forventet levetid ca. 12-18 måneder ved daglig brug. Brugsværdien øges ved at beskytte puden mod fugt og direkte sollys samt at stille puden på hjørkant, så den kan ventileres, når den ikke benyttes. Når skummet er dødt – dvs. ikke rejser sig helt igen efter at have været presset sammen, nedsættes pudens effekt og bør skiftes snarest muligt. Kontroller derfor jævnligt puden – især efter 1 års anvendelse.

Pudens forventede holdbarhed er gældende fra den tages i brug. Derfor anbefaler vi, at man benytter sig af afkrydsningsskemaerne, der er placeret på hhv. pudens skum og betræk. På betrækket er afkrydsningsskemaet på symærket med vaskeanvisning. Billedet nedenfor viser,

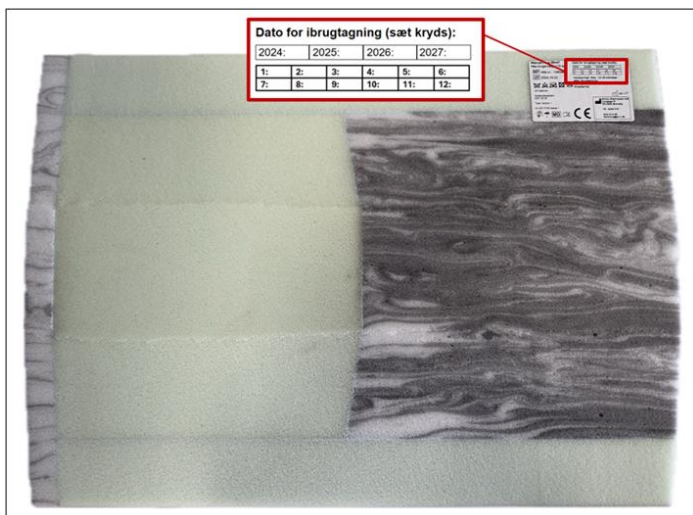

hvor afkrydsningsskema for ibrugtagning er placeret på pudens skum:

Billede: Pude uden betræk. Afkrydsningsskema er placeret i bunden af puden. Kryds af hvilket år samt hvilken måned (1-12), puden er taget i brug. Din pude kan se anderledes ud end denne.

Mærkning

I bunden af skumpuden og bagerst i det tilhørende betræk findes mærkning med relevante informationer for det enkelte produkt. Det anbefales at mærkning ikke fjernes fra produkterne.

Eksempel på mærkning der findes på produktet ses nedenfor. Bemærk, at størrelse, dato, HMI-nummer, UDI og LOT/REF/SN-nummer kan variere fra eksemplet.

Mærkning på skum

Pelvis Høj 40x41 Max brugervægt 110 kg		Dato for ibrugtagning (sæt kryds):																	
REF HMI-nr.: 87920		<table border="1"> <tr> <td>2025:</td> <td>2026:</td> <td>2027:</td> <td>2028:</td> </tr> <tr> <td>1:</td> <td>2:</td> <td>3:</td> <td>4:</td> </tr> <tr> <td>5:</td> <td>6:</td> <td>7:</td> <td>8:</td> </tr> <tr> <td>9:</td> <td>10:</td> <td>11:</td> <td>12:</td> </tr> </table>		2025:	2026:	2027:	2028:	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	8:	9:	10:	11:	12:
2025:	2026:	2027:	2028:																
1:	2:	3:	4:																
5:	6:	7:	8:																
9:	10:	11:	12:																
LOT 2026-01-08		Holdbarhed: Max. 12-18 måneder efter ibrugtagning																	
		OBS! Dødt skum kan forekomme efter 1 års ibrugtagning.																	
UDI-bæreren: (01)05744007000780 (11)260108	Godkendelsesdato: 2021.03.09 Type: Version 1 EU 2017/745 klasse 1																		
		 Schou Rasmussen ApS Lyngager 8 DK-2605 Brøndby Tlf.: 44531727 www.sr-s.dk emilie@sr-v.dk																	

Mærkning på betræk:

Pelvis Høj 40x41 REF HMI nr. 87920 LOT 2026-01-08 2026-01-08 Godkendelsesdato: 2021.03.09 Type: Version 1 EU 2017/745 klasse 1 UDI-bæreren: (01)05744007000780 (11)260108 	Max brugervægt: 110 kg Dato for ibrugtagning: <table border="1"> <tr> <td>2025:</td> <td>2026:</td> <td>2027:</td> <td>2028:</td> </tr> <tr> <td>1:</td> <td>2:</td> <td>3:</td> <td>4:</td> </tr> <tr> <td>5:</td> <td>6:</td> <td>7:</td> <td>8:</td> </tr> <tr> <td>9:</td> <td>10:</td> <td>11:</td> <td>12:</td> </tr> </table> Bag/Back	2025:	2026:	2027:	2028:	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	8:	9:	10:	11:	12:	 Schou Rasmussen ApS Lyngager 8 2605 Brøndby Tlf.: 44531727 www.sr-s.dk emilie@sr-v.dk
2025:	2026:	2027:	2028:															
1:	2:	3:	4:															
5:	6:	7:	8:															
9:	10:	11:	12:															

Bortskaffelse

Brugeren skal sørge for en aftale med kommunen om bortskaffelse eller tilbagelevering.

Tilkøb af inkontinensbetræk

Inkontinensbetræk, som monteres under standardbetrækket, beskytter sædepuden mod væsker. Betrækket kan kogevaskes ved max. 90°C og tåler sprit. Betrækket skal lufttørre og tåler ikke tørretumbler. Ved montering af betrækket skal det sikres, at alle hjørner er korrekt monteret, og den formede overflade vender op mod brugeren.

Inkontinensbetrækket indeholder det antibakterielle stof 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate for at forhindre vækst af bakterier og svamp. Vær opmærksom på, at det hos nogle kan forårsage hudirritationer ved direkte kontakt med hud.

Inkontinensbetrækket kan tilkøbes hos Schou Rasmussen.

Tekniske data

Tekniske data omkring anvendte materialer kan rekvireres hos fabrikanten.

Garanti

PELVIS HØJ sædepude produceres og forhandles i henhold til gældende europæisk lovgivning om medicinsk udstyr. Fabrikantens forpligtelser i tilfælde af fejl og mangler betinges af, at tredjemand ikke har foretaget indgreb i produktet.

Fabrikant

SCHOU RASMUSSEN ApS - Lyngager 8 - 2605 Brøndby - Danmark

Telefon: 44531727 / www.sr-s.dk / emilie@sr-v.dk

