

## Brugsanvisning SR JUNIOR sædepude (rev 2026-01)

Dette udstyr efter mål er fremstillet i overensstemmelse med Forordningen for Medicinsk Udstyr, 2017/745, herunder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Schou Rasmussen leverer denne sædepude efter mål med en forventning om, at der fra kundens side afsættes ressourcer til at følge op på brugeren af puden de første 14 dage efter den er taget i brug, mhp. at evaluere om puden opfylder det forventede formål.

**Forhandler:** Denne brugsanvisning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af **SR JUNIOR** sædepude forstår produktoplysningerne.

**Kunde:** Læs denne brugsanvisning grundigt for at opnå den optimale brug af **SR JUNIOR** sædepude. Anvend puden under vejledning fra fagprofessionelle. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidigt brug af **SR JUNIOR** sædepude.

### Leverancens indhold

1 **SR JUNIOR** sædepude

1 aftageligt standardbetræk

1 brugsanvisning

### Produktbeskrivelse

**SR JUNIOR** sædepude er opbygget med en brønd af trykaflastende Panteraskum, 150 kg brandhæmmende koldskum i siderne, og afslutningsvis 20 mm Panteraskum over hele siddefladen. Pudens har et let sidestyr i begge sider og en skrå forkant med et fremspring på 1½ cm. Den er 7 cm høj og kan derfor bruges til børn og personer, der vejer op til 45 kg.

**SR JUNIOR** pudens giver ekstra bæring, god komfort og en let indadstyring af lårbenet.

Målene for pudens er angivet på mærkningen. Husk at sikre, at du har valgt den rette størrelse pude til den stol brugeren anvender pudens i. Målene anvendes også til at bestille ekstra betræk til pudens.

Pudens erklærede formål er at give brugeren en stabil siddestilling og sikre en trykfordeling, som forebygger trykskader på kroppen.

**Hvis du ønsker yderligere information om SR JUNIOR sædepude kontakt venligst fabrikanten: SCHOU RASMUSSEN ApS, Lyngager 8, DK-2605 Brøndby  
Tlf. 44531727, e-mail: emilie@sr-v.dk**

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med puden, bør indberettes til:  
Schou Rasmussen ApS og Lægemiddelstyrelsen

## **Brugsanvisning**

- Maksimal brugervægt er 45 kg.
- Fjern al emballage før brug.
- Anbring puden på en stol eller kørestol med mærkatet "Bag/Back" og lynlås placeret bagud.
- Den formede overflade skal vende opad.
- Betrækket er åndbart og strækbart i flere retninger, hvilket sikrer brugerens komfort og maksimerer skummets effektivitet.
- Undgå at anvende yderligere lag eller polstring mellem bruger og puden, da dette kan reducere pudens effektivitet.
- Det indvendige skum bør inspiceres regelmæssigt. Hvis betrækket beskadiges, må puden ikke anvendes før der er monteret et nyt betræk.
- Ved montering af betrækket skal det sikres, at alle skummets hjørner er korrekt monteret i betrækket. Det skal desuden sikres, at den formede overflade vender op mod brugeren, og at mærkatet "BACK" og lynlåsen er placeret bagud.
- Skummet tåler ikke vand og væsker. Ved inkontinens kan der tilkøbes inkontinens-betræk.
- Skummet kan ikke vaskes.
- Skridsikring på undersiden: Der er påsyet 2 stk. 5 cm bred Astrakan (Velcro).
- Kontrollér, at puden sidder fast på bunden efter placering.
- Puden skal monteres som anvist på nedenstående billede:



## Rengøring og pleje

Betrækket er vaskbart og kan rengøres med en opløsning af neutralt vaskemiddel og varmt vand påført med engangsklud eller maskinvaskes ved 60°C med vaskemiddelopløsning.

Vi anbefaler ikke at vaske betrækket i vaskemaskinen ofte.

Luk lynlåsen på betrækket før vask. Det anbefales at bruge et vaskenet for at skåne betrækket og andet det vaskes sammen med. Vaskes sammen med lignende farver. Brug ikke blegemiddel, blødgøringsmiddel og kemiske rensmidler! Betrækket skal lufttørre efter vask.

**OBS! Betrækket tåler ikke tørretumbler, skal lufttørres.**

Betrækkets underside og kanter bagtil og i højre/venstre side er monteret med sort PVC.


PVC-materialet rengøres bedst ved aftørring med fugtig klud påført opvaskemiddel. Stærkt tilsmudsede områder rengøres med f.eks. Maxi 3 eller andet alkalisk rengøringsmiddel. Prøv altid først på et ikke synligt sted ved benyttelse af stærkt koncentrerede rengøringsmidler. Brug ingen opløsningsmidler, renseservietter, blegemidler, voks eller lignende.

Brandsikkerhed er efter EU klasse B1.

## Holdbarhed

Forventet levetid ca. 12-18 måneder ved daglig brug. Brugsværdien kan øges ved at beskytte puden mod fugt og direkte sollys samt at stille sædepuden på højkant, så den kan ventileres, når den ikke benyttes. Når skummet er dødt – dvs. ikke rejser sig helt igen efter at have været presset sammen, nedsættes pudens effekt og bør skiftes snarest muligt. Kontrollér derfor jævnligt puden – især efter 1 års anvendelse.

Pudens forventede holdbarhed er gældende fra den tages i brug. Derfor anbefaler vi, at man benytter sig af afkrydsningsskemaerne, der er placeret på hhv. pudens skum og betræk. På

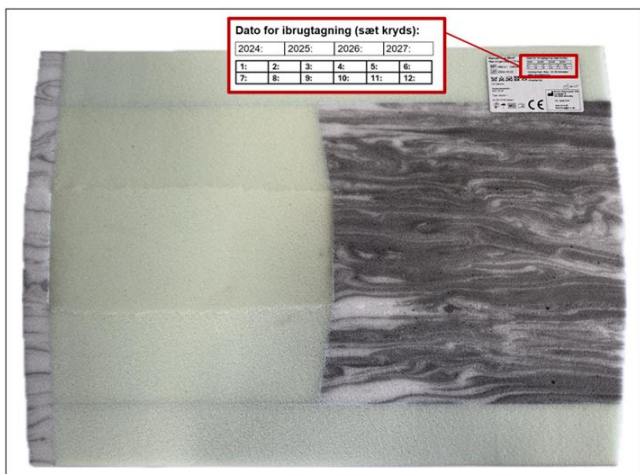

betrækket er afkrydsningsskemaet på symærket med vaskeanvisning. Billedet nedenfor viser, hvor afkrydsningsskema for ibrugtagning er placeret på pudens skum:

*Billede: Pude uden betræk. Afkrydsningsskema er placeret i bunden af puden. Kryds af hvilket år samt hvilken måned (1-12), puden er taget i brug. Din pude kan se anderledes ud end denne.*

## Mærkning

## Mærkning

I bunden af skumpuden og bagerst i det tilhørende betræk findes mærkning med relevante informationer for det enkelte produkt. Det anbefales at mærkning ikke fjernes fra produkterne.

Eksempel på mærkning der findes på produktet ses nedenfor. Bemærk, at størrelse, dato, HMI-nummer, UDI og LOT/REF/SN-nummer kan variere fra eksemplet.

### Mærkning på skum

**SR Junior, HMI-nr.: 127108**  
**Sædepude efter mål**  
Max brugervægt 45 kg

**SN** 0000

 2026-01-08

Dato for ibrugtagning (sæt kryds):

| 2025: | 2026: | 2027: | 2028: |
|-------|-------|-------|-------|
| 1:    | 2:    | 3:    | 4:    |
| 5:    | 6:    | 7:    | 8:    |
| 9:    | 10:   | 11:   | 12:   |

Holdbarhed: Max. 12-18 måneder efter ibrugtagning

OBS! Dødt skum kan forekomme efter 1 års ibrugtagning.

**MD**  



 Schou Rasmussen ApS  
Lyngager 8  
DK-2665 Brøndby

Tlf.: 44531727

[www.sr-s.dk](http://www.sr-s.dk)  
[emilie@sr-v.dk](mailto:emilie@sr-v.dk)

### Mærkning på betræk:

Max brugervægt: 45 kg

Dato for ibrugtagning:

| 2024: | 2025: | 2026: | 2027: |
|-------|-------|-------|-------|
| 1:    | 2:    | 3:    | 4:    |
| 5:    | 6:    | 7:    | 8:    |
| 9:    | 10:   | 11:   | 12:   |

**MD**

SR JUNIOR 30x30  
HMI nr. 127108

**Bag/Back**

**SN** 0000

 2026-01-08



Schou Rasmussen ApS  
Lyngager 8  
2605 Brøndby

Tlf.: 44531727

[www.sr-s.dk](http://www.sr-s.dk)  
[emilie@sr-v.dk](mailto:emilie@sr-v.dk)

## **Bortskaffelse**

Brugeren skal sørge for en aftale med kommunen om bortskaffelse eller tilbagelevering.

## **Tilkøb af inkontinensbetræk**

Inkontinensbetræk, som monteres under standardbetrækket, beskytter sædepuden mod væsker. Betrækket kan kogevaskes ved max. 90°C og tåler sprit. Betrækket skal lufttørre og tåler ikke tørretumbler. Ved montering af betrækket skal det sikres, at alle hjørner er korrekt monteret, og den formede overflade vender op mod brugeren. Inkontinensbetrækket kan tilkøbes hos Schou Rasmussen.

## **Tekniske data**

Tekniske data omkring anvendte materialer kan rekvireres hos fabrikanten.

## **Risikoanalyse**

I henhold til gældende europæisk lovgivning om medicinsk udstyr er der udarbejdet en risikoanalyse af hver **SR junior** sædepude.

## **Garanti**

**SR JUNIOR** sædepude produceres og forhandles i henhold til gældende europæiske lovgivning om medicinsk udstyr. Fabrikantens forpligtelser i tilfælde af fejl og mangler betinges af, at tredjemand ikke har foretaget indgreb i produktet.

## **Fabrikant**

SCHOU RASMUSSEN ApS - Lyngager 8 - 2605 Brøndby - Danmark

Telefon: 44531727 / [www.sr-s.dk](http://www.sr-s.dk) / [emilie@sr-v.dk](mailto:emilie@sr-v.dk)